

KÄYTTÖHJEET

Lääketeollisen lastan 5003000 Flexsplint käyttöön

Flexsplint lääketieteellinen lasta

Käyttötarkoitus

Flexsplint on loukkaantuneen henkilön fyysinen apuväline, joka tukee tai varmistaa loukkaantunutta kehon kohtaa ensiavussa, tai fysioterapiassa. Lasta asetetaan tukemaan potilaan ylä- tai alaraajaa jolloin voidaan estää lisävammojen syntyminen ja antaa potilaan vahingoittaneelle raajalle lisätukea.

Kenelle tarkoitettu

Tämä lääketieteellinen lasta on tarkoitettu: Ensihoitoon, kenttäsaaraanhoitoon, eläinlääkintään, rinnepartioille, ulkoilmaharrastuksiin jne.

Käyttöohjeet

Muotoile lasta niin, että se tukee vahingoittunutta raajaa. Kiinnitä lasta teipillä tai siteellä.

-Kevyt, voidaan säilyttää pienessä tilassa, Nopea ottaa käyttöön.

-Hylkii vettä. Röntgensäteestä läpäisevä.

-Ei sisällä lateksia

Puhdistus ja desinfiointi

1. Puhdista lasta lämpimällä saippuavedellä ja liinalla tai pehmeällä harjalla jokaisen käyttökerran jälkeen. Kuivaa huoneenlämmössä.
2. Pyyhi lasta pesun jälkeen desinfiointiaineella. Noudata paikallisia ohjeita. Kuivaa huolellisesti.

Säilytys Vältä korkeita lämpötiloja ja

kosteutta

Säilyvyys Viisi vuotta



Varoitus

Käyttö lääkärin tai sairaanhoitajan valvonnassa



Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd.
500 meter, Nan Sucun, Anping County, Hengshui City, Hebei-provinsin, 053600, Kina.



MedNet EC- REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

Distribution Finland

Ferno Norden Finland Oy
Company reg.nr. 0577048-5
www.fernonorden.fi
Phone: +358 (0)29-1700 454
Address: Ahjokatu 4A, 15800 Lahti – Finland



Datum: 31 augusti 2020

Version: A / 1