




1. GRUNNLEGGENDE BØYNINGER: LAG STERKE BØYNINGER

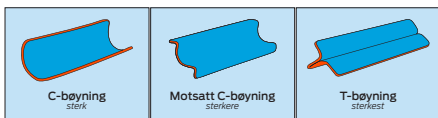


2. FINGER

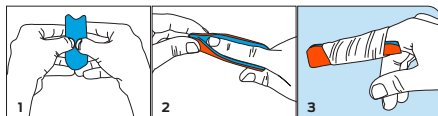


3. TOMMEL

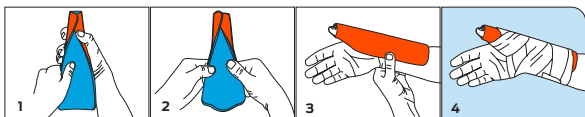


4. HÅND

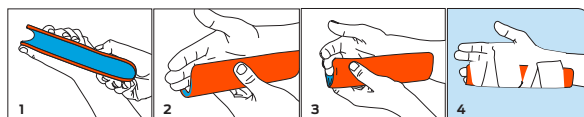


5. HÅNDEDD

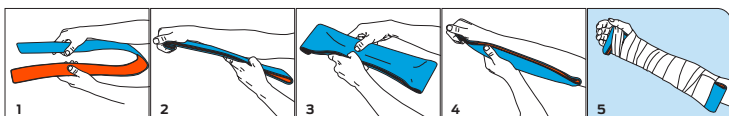


6. OVERARM

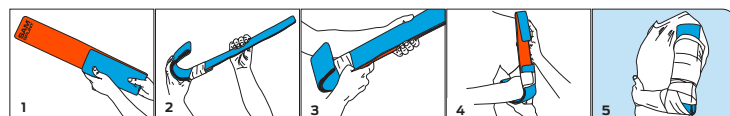


7. HÅNDEDD

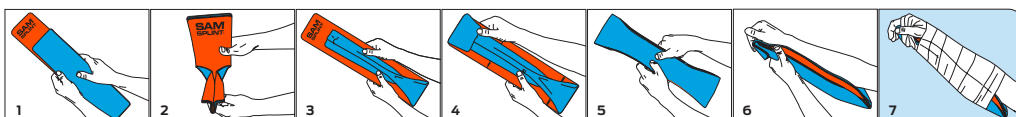


8. HÅNDEDD

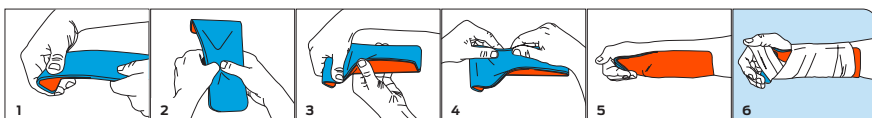


9. HÅNDEDD/UNDERARM

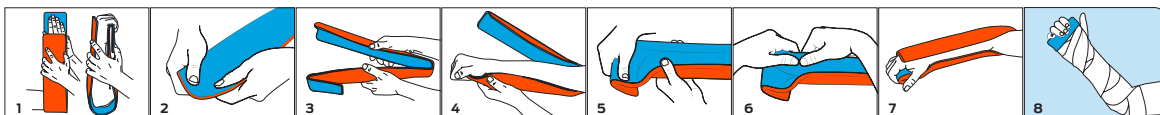


10. ALBUE

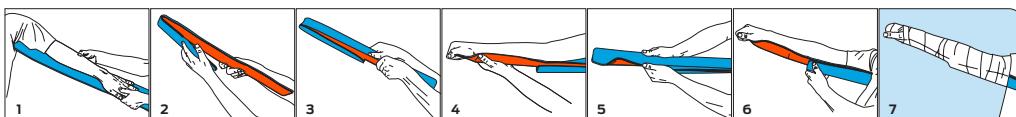


11. ØVRE DEL AV BEIN

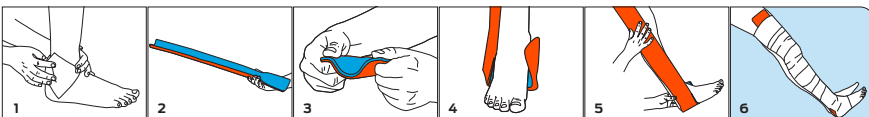


12. ANKEL

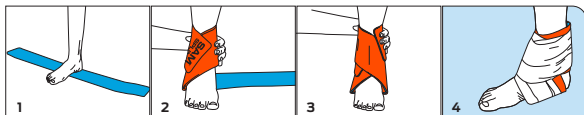


13. ANKEL

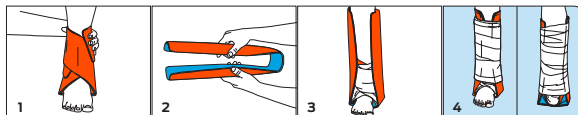


14. KNE

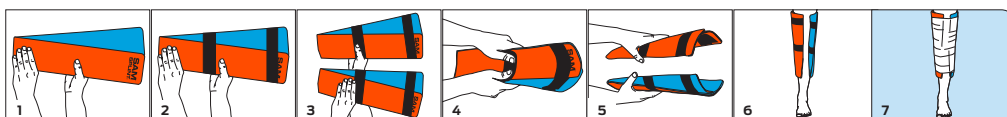

15. NEDRE DEL AV BEIN

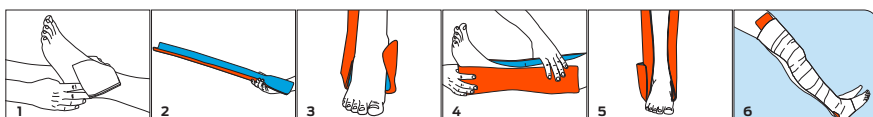

16. ANKEL

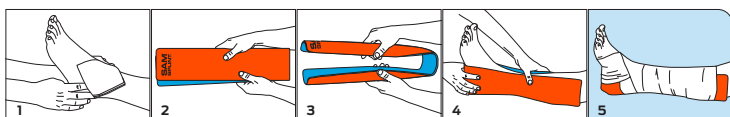

VEDLIKEHOLD

SAM[®] Splint er en gjenbrukbar, formbar støtteskinne som kan rengjøres ordentlig og desinfiseres for ytterligere bruk i felten. Disse retningslinjene er anbefalinger for å få mest mulig utbytte av levetiden til SAM[®] Splint. Pasientene bør følge den spesifikke rengjørings- og desinfeksjonspraksisen som anbefales av legen.

RENGJØRINGSPROSEDYRE

Hvis du bestemmer deg for å bruke SAM[®] Splint om igjen, skal den først rengjøres med en klut eller svamp fuktet med såpe og vann eller et mildt rengjøringsmiddel for å fjerne grov kontaminasjon. Blod, kroppsvæsker, kroppsvæv eller annet smussmateriale skal fjernes fullstendig før desinfeksjon.

Deretter klargjøres en fortykning med natriumhypokloritt (for eksempel Klorin) for en endelig konsentrasjon på 0,625 % til 0,7 %. Dette kan for eksempel gjøres med 1 del klor til 9 deler vann med normalt husholdningsklor eller med 1 del klor til 11 deler vann for «konsentrert» klor.

Senk SAM[®] Splint helt ned i den fortynnede klorløsningen og sørg for at alle luftbobler fjernes fra skinnen ved å vaske overflatene (inkludert sidene) med en ren klut mens den er i klorløsningen. La SAM[®] Splint ligge i klorløsningen i 10 minutter etter vasking.

SAM[®] Splint skal ALLTID skylles godt med rennende vann etter nedsenking og deretter lufttørkes eller tørkes med et håndkle før den tas i bruk igjen.

BRUKSOMRÅDE

SAM Splint er beregnet på å immobilisere ekstremiteter midlertidig etter traumatisk skade.

INDIKASJONER FOR BRUK

SAM Splint er en ikke-steril, gjenbrukbar enhet som er beregnet på bruk i kortvarig, prehospitalt miljø for å behandle akutte traumer som forstuinger, forstrekninger, bloduttredelser og brudd og for å forhindre ytterligere skade under transport til sykehus/akuttmottak.

⚠ FORHOLDSREGLER

- Hvis skinnen klippes til, må den avklippede enden dekkes med beskyttelsesteip og/eller brettes under
- Inspiser enheten etter bruk, og kasser den hvis aluminiumen vises

⚠ MR-SIKKER UNDER VISSE BETINGELSER

SAM Splint er MR-sikker under visse betingelser (MR Conditional), og denne informasjonen gjelder for hele serien med eksisterende SAM Splint. Det ble gjennomført ikke-klinisk testing og MR-simuleringer for å identifisere verst tenkelige forhold som ble brukt til å vise at SAM Splint er MR-sikker under visse betingelser. En pasient med denne enheten kan skannes trygt umiddelbart etter plassering under følgende betingelser:

- Statisk magnetfelt på kun 1,5 eller 3 tesla
- Maksimalt magnetfelt for romlig gradient på 10 000 gauss/cm (ekstrapolert) eller mindre
- Maksimum MR-systemrapportert, gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonshastighet (SAR) for hele kroppen på 4 W/kg for 15 minutter med skanning (dvs. per pulssekvens) i kontrollert driftsmodus på første nivå for MR-systemet

Under de definerte skanningsforholdene forventes det at SAM Splint produserer en maksimal temperaturøkning på 2,5 °C etter 15 minutter med kontinuerlig skanning (dvs. per pulssekvens).

Bildeartefakten som forårsakes av SAM Splint, strekker seg omtrent 10 mm fra denne enheten når den avbildes med en gradientekkopulssekvens og et 3 tesla MR-system, i ikke-klinisk testing.

Melding til brukere og/eller pasienter:

Alle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemslandet der brukeren og/eller pasienten holder til.

SYMBOLFORKLARING:

Produsent		MR-sikker under visse betingelser	
Partikode		Forsiktig	
Ikke laget med naturgummilateks		CE-merking	
Katalognummer		Autorisert representant i EU	
Medisinsk utstyr		Importør	
Røntgenjennomtrengelig		Se bruksanvisningen. Elektronisk bruksanvisning tilgjengelig på: sammedical.com/eIFU	