

**are**equipment



**Bruksanvisning:  
M766 – Likhusbåre**

## M766 – Likhusbåre

Monoblock M766 Likhus er et utstyr med en permanent bære og den aktiveres manuelt. Hovedformålet er å transportere lik. Dette produktet er utviklet og produsert av Auto Ribeiro Lda.

### Utstyrsoversikt



### SPESIFIKASJONER

- Omtrentlig vekt: 41 kg
- Maksimal tillatt belastning: 250kg
- Omtrentlige dimensjoner (lukket): 1950 x 560 x 455 mm
- Omtrentlige dimensjoner (åpen): 1950 x 560 x 990 mm

## UTTREKKBARE HÅNDTAK

### Sikkerhetssystem



1° - Trykk på knappen med fingeren din.



2° - Trekk eller dytt for å justere til ønsket lengde.

## TILBEHØR

### Sikkerhetsstopper



Stropper for overkropp og ben.

## VEDLIKEHOLD

- Utfør en visuell inspeksjon ved hver femtiende brukssyklus.
- Smør de mekaniske betjeningsanordningene med høy viskositet smøremiddel to ganger i måneden, hver 14. dag.
- Kontroller grepet til koblingsanordningene kvartalsvis. Utfør en justering hvis nødvendig.

## RENGJØRING OG DESINFISERING

- Rengjør og desinfiser utstyret etter hver bruk.
- Bruk et desinfiseringsmiddel som virker mot bakterier, sopp og virus.
- Ikke lagre utstyret uten at det er helt tørt.
- Ikke bruk etsende og slipende kjemiske produkter.

## STYRING AV BAKBEN

### Sikkerhetssystem



1° - Løft opp sikkerhetstappen.



2° - Trykk på den VENSTRE spaken til den begynner å bevege på seg og hold den inne.

(MERKNAD: for å stoppe nedsenkingen av bakbenet i mellomstilling må du trykke på spaken og slippe den igjen umiddelbart.

## STYRING AV FORBEN

### Sikkerhetssystem



1° - Løft opp sikkerhetstappen.



2° - Trykk på den HØYRE spaken til den begynner å bevege på seg og hold den inne.

## STYRING AV FORBEN (i mellomstilling)

### Sikkerhetssystem



1° - Løft opp tappen (finnes på høyre side av båren).



Sluttstilling.


## HJUL

### Svingbare hjul



2 svingbare hjul.

### Stasjonære hjul

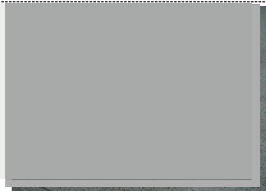

2 stasjonære hjul.



### Låse de stasjonære hjulene

1° - Aktiver låsetappene med foten slik at hjulene forblir låst.



Rua de S. Caetano, 551 Apartado 526  
4411-701 Canelas; Vila Nova de Gaia, Portugal  
Telf: +351 227157100 , Fax: +351 2271244  
support@arequipment.com  
www.arequipment.com

## SERIAL NUMBER / Serienummer

