

# Bruksanvisning

## Universalt huvudstöd

### modell F-445

#### **VIKTIGT!**

Denna bruksanvisning är gjord för att hjälpa användaren till en säker och effektiv användning av **F-445 Universalt huvudstöd**.

F-445 är framtaget för att stödja patientens huvud och nacke vid samtidig användning av nackkrage och F-065 scoopbår.

Denna bruksanvisning är menad som en vägledning - inte som en medicinsk rekommendation. Den skall inte heller uppfattas som en medicinsk behandlingspraxis eller teknik, men skall användas tillsammans med tillräcklig kunskap om anatomi och fysiologi samt efter eventuella lokala riktlinjer.

Samtliga användare bör läsa denna bruksanvisning, samt träna användning, för att kunna använda F-445 universalt huvudstöd på rätt sätt.

## **BESTÅNDSDELAR:**

### **SPECIFIKATIONER:**

Ferno Washington Inc. förbättrar ständigt sina produkter. Därför kan specifikationerna ändras utan förvarning.

### **ANVÄNDNING:**

Det krävs 2 personer för att fästa huvudstödet korrekt. I speciella situationer kan det vara nödvändigt att vara 3 personer eller flera.

Användarna ska vara kompetenta nog att välja och kombinera rätt utrustning för att kunna ge optimal behandling, samtidigt som största säkerhet och komfort tillses.

### **KONTROLL OCH UNDERHÅLL:**

En av de viktigaste faktorerna när det gäller underhåll av F-445 universalt huvudstöd, är kontroll. Denna bör ske samtidigt som den rutinmässiga kontrollen av annan behandlingsutrustning i ambulansen. Då tillses att utrustningen är komplett och funktionsduglig.

Placera patienten på F-065 Scoopbåren efter gällande riktlinjer.  
**Tänk på att nackkragen ska sättas på innan patienten placeras på båren!**

Medan person 1 stödjer patientens huvud/nacke, skjuter person 2 försiktigt huvudstödet, från Scoopbårens huvudända, in under patientens huvud.

Person 1 stödjer fortfarande patientens huvud/nacke medan person 2 spänner fast de orangefärgade remmarna. Den grå remmen fästs runt röret i Scoopbårens huvudända.

De 2 kuddarna placeras på var sida om patientens huvud. De **vinklade** sidorna ska vara vända inåt, mot patientens huvud vid användning på **F-065 Scoopbår**. Vid användning på **F-2001 Backboard** ska de **raka** sidorna vara vända inåt mot patientens huvud.

De 2 pann/hakbanden spänns över pannan respektive hakan och fästs i ringarna på var sida av underläggsskivan.

**Kom ihåg att träna regelbundet!**

**FÖRVARING:**

F-445 universalt huvudstöd kan förvaras som en komplett enhet. Fäst remmarna på underläggsskivan.

Placera de 2 kuddarna på underläggsskivan och fäst dem med pann/hakbanden.

Förvaras F-445 enligt denna anvisning, går den snabbt att använda i en akut situation. F-445 kan rengöras med mild tvållösning.

## F-445 Universalt huvudstöd Reservdelslista

<b>Detalj nr:</b>	<b>Reservdelsnr:</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Kvantitet</b>
1	FR-039020400	Pann/hakband	2
2	FR-039020500	Stödkuddar	1
3	FR-039020600	Underläggsskiva	1

